




milian

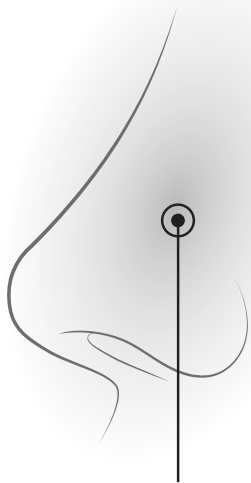

СПРЕЙ ЗА НОС

Без консерванти

20 мл.



ПОКАЗАНИЯ

Спрей за нос Milian е медицинско изделие за назално приложение, състоящо се от стерилен хипертоничен разтвор, без консерванти, с Tween 80, хиалуронова киселина и EDTA, в спрей бутилка от 20 ml.

Благодарение на комбинираното действие на EDTA и Tween 80 в хипертоничен разтвор, **Спрей за нос Milian** е показан за почистване на носните кухини, по-специално за разреждане и механично отстраняване на слоя от бактериален биофилм, типичен за хроничен риносинусит и синдроми на охлаждане, с възстановяване на мукоцилиарния клирънс. Наличието на хиалуронова киселина има овлажняващо и омекотяващо действие, като намалявайки усещането за сухота на носната лигавица и я защитава от външни агенти като дим, смог, прах, полен, възможни причини за гразнещи смущения.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Леко разклатете спрей бутилката преди употреба.
2. Махнете защитната капачка.
3. Дръжте спрей бутилката с палец под основата и найкрайника между двата пръста.
4. При първата употреба натиснете помпата няколко пъти докато започне да се пръска равномерно.
5. Издухайте носа преди употреба
6. Наклонете главата си леко назад и вкарайте найкрайника в ноздрата
7. Пръскайте и едновременно дишайте леко през носа.
8. След употреба почистете и затворете найкрайника със защитната капачка.
9. Продуктът е за употреба от един пациент.



СЪСТАВ: Натриев хялуронат, натриев хлорид (2,5%), Tween 80, EDTA, натриев фосфат двуосновен дихидрат, натриев фосфат моноосновен монохидрат, пречистена вода до 100 мл.

ОПАКОВКА: Кутията се състои от спрей бутилка от 20 мл, която може да се затваря многократно.

ВНИМАНИЕ:

Консултирайте се с вашия лекар за употреба при деца и по време на бременност и кърмене.

Продуктът е само за инхалации, не поглъщайте и не използвайте освен според указанията за употреба.

След отваряне и използване накрайникът трябва да се почисти и затвори с подходяща защитна капачка, а остатъчният разтвор трябва да се използва в рамките на 3 месеца след отварянето.

За да се избегне възможното разпространение на инфекции, спрейът се използва от един пациент.

Не използвайте продукта, ако опаковката е повредена или бутилката не е цяла. Добре измийте ръцете си преди употреба.

Не докосвайте други повърхности, освен лигавицата на носа, с края на бутилката.

Не използвайте продукта в случай на известна непоносимост, дори към един компонент от формулата. При нарушения като чувствителност или раздръжнене по време на употреба, незабавно прекратете лечението и се консултирайте с лекар.

Приложението на лекарства за инхалиране едновременно със спрей за нос трябва да се извършва под надзор на лекар, който може да оцени възможните взаимодействия.

Дръжте далеч от деца.

Не използвайте продукта след датата на изтичане на годността, посочена върху опаковката. Не изхвърляйте контейнера в околната среда след употреба.

Съхранявайте на сухо място, далеч от източници на топлина и директно излагане на слънчева светлина, съхранявайте в кутията. Температурата не трябва да превишава 25°C.

В случай на сериозни претенции или инциденти относно изделието, е необходимо да докладвате инцидента на производителя.

ГОДНОСТ: 36 месеца с непокътната опаковка.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Enable Innovations - Srl Via Claudio Tolomeo n°20/4; 41012 Карпи (МО), Италия

ДИСТРИБУТОР: Капелфарма ООД, гр.Пловдив, ул.Света Петка 16, ет.2

