



ТРЕБВА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА, ПРИЛОЖЕНА КЪМ ОПАКОВКАТА, ТЪЙ КАТО СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА BABYNEBUCAP, СЛЕД КОЕТО ДА СЕ СЪХРАНЯВА, ЗА ДА МОЖЕ ОТНОВО ДА СЕ ПРОЧЕТЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

## **BABYNEBUCAP**

Инструкция за употреба

### **Медицинско изделие**

**85 ml/85 мл**

#### **1. Какво е BABYNEBUCAP?**

BABYNEBUCAP е изотоничен разтвор на натриев хлорид под формата на непрекъсната, деликатна мъгла предназначена за овлажняване и хигиена на лигавиците на горните дихателни пътища. Използването на продукта позволява съвсем тихо, мултипозиционно приложение, не изискващо допълнителен източник на хранване, подобно на небулизацията. Продуктът се прилага едновременно за носа и устната кухина благодарение на използването на нова система за прилагане. Размерът на разпръскваните частици влияе върху по-равномерното разпределение на продукта в горните дихателни пътища.

#### **2. С каква цел се използва BABYNEBUCAP?**

Неприятното усещане на сухота в устата и носната кухина може да се появи при всеки, независимо от възрастта. Към основните причини за заболяването се включват м/у другото:

- често пребиваване в отоплени и/или климатизирани помещения,
- използване на капки за нос (съдържащи субстанции, свиващи кръвоносните съдове на носната кухина, напр. ксилометазолин),
- инфекции на горните дихателни пътища,
- вдишване на замърсен въздух.

Сухотата на лигавиците на горните дихателни пътища не е сериозно заболяване, но може съществено да намали комфорта на живот. Изсушената лигавица много бързо става раздразнена, което може да предизвика сърбеж, оток, кихане, даже и кървене. В крайни случаи може да причини възпаление на синусите и гърлото, тъй като неправилно овлажнената лигавица на носната и устната кухина става много податлива на действието на вируси, бактерии и други патогени.

**BABYNEBUCAP** силно овлажнява носната, устната кухина и гърлото. Може да се използва при усещане за сухота на лигавицата на устната и носната кухина, причинена от различни фактори, както и при хрема и синусит, възникнали в резултат на инфекция или алергия.

**BABYNEBUCAP** улеснява отделянето на секрети, пречиства лигавиците, подпомага естествения процес на пречистване на дихателните пътища. Липсата на натрупан секрет намалява риска от размножаване на

микроорганизми.

Поради своето хидратиращо и пречистващо действие, се препоръчва да се използва при:

- изсушаване на лигавиците на устната кухина, носа и гърлото,
- задържане на секрет в горните дихателни пътища,
- дрезгавост, причинена от сухота на лигавиците,
- профилактично и поддържащо при терапия на възпаление на лигавиците и инфекции на горните дихателни пътища

Продуктът не съдържа консерванти и лекарствени субстанции. **BABYNEBUCAP** улеснява всекидневната хигиена на носа. Безопасен е дори при продължителна употреба. Редовната употреба на **BABYNEBUCAP** има благоприятен ефект за подобряване хидратацията на лигавицата на носа, синусите, устната кухина и гърлото. Овлажнените лигавици, без остатъчни секрети са по-малко податливи на бактериални и вирусни инфекции. Използването на продукта носи облекчение и комфорт при дишане в къщи и по време на пътуване.

### **3. Дозировка и начин на употреба на BABYNEBUCAP**

**BABYNEBUCAP** трябва да се използва съгласно инструкцията за употреба. Продуктът е предназначен за възрастни и деца от 1 годишна възраст.

#### ДОЗИРОВКА:

Възрастни: 3 до 4 пъти дневно по 4 - 5 минути в зависимост от нуждата.

Деца от 1 годишна възраст: 2 до 3 пъти дневно по 4 - 5 минути в зависимост от нуждата

Продуктът е достатъчен за приложение около 90 минути.

#### НАЧИН НА УПОТРЕБА:

След отваряне на опаковката извадете всички елементи, които се намират в нея. Използвайте топла вода и деликатно миешо средство (напр. сапун), измийте адаптера и маската. Изплакнете добре с вода и подсушете.

Свалете капачката на апликатора и поставете адаптера върху апликатора.

Прикрепете маската и я насочете с върха на горе.

Завъртете апликатора (дозирането ще започне) и сложете маската на носа и устата.

По време на използване дишайте дълбоко.

За да спрете образуването на мъгла, завъртете апликатора в обратна посока.

След употреба измийте адаптера и маската по същия начин, както преди употреба.

**Начинът на монтаж и употреба на продукта са представени на графиката по-долу:**

*Свалете капачката на апликатора Поставете адаптера върху апликатора.*

*Завъртете апликатора*

*Прикрепете маската и я насочете с върха нагоре. (дозирането ще започне)*

#### 4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност (алергия) към някоя от съставките на продукта.

#### 5. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Не използвайте продукта, след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Ако се появят алергични реакции или други обезпокоителни симптоми (напр. упорита кашлица), прекратете употребата на продукта.

При използване на продукта върху раздразнени лигавици, може да се появи усещане за парене или сърбеж, което е нормален симптом при прилагане на продукти, съдържащи натриев хлорид.

Продуктът може да се използва при деца само под наблюдение на възрастен.

Препоръчва се продуктът да се използва в седнало положение.

Ако имате съмнения, свържете се с лекар или фармацевт.

За по-добра хигиена и избягване разпространението на инфекции, се препоръчва един апликатор и маска да се използват само от едно лице.

**Внимание!** Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Да се пази от топлина, нагорещи повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Не пушете. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури по-високи от 50°C / 122°F. Да се съхранява извън обсега на деца.

#### 6. СЪСТАВ

Натриев хлорид с фармацевтично качество, деминерализирана вода.

#### 7. НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка, при темп. 5 - 25 оС.

Да се съхранява на недостъпно за деца място.

#### 8. ОПИСАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

**ВАВУНЕВУСАР** е опакован в алуминиев контейнер съдържащ 85ml/85мл разтвор. Индивидуалната опаковка съдържа кутия от 85ml/85мл, адаптер, маска, инструкция за употреба и картонена кутийка.



#### ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Jago-Pro Sp. z o.o.

ul. Szczakowska 35

43-600 Jaworzno, Polska

[www.jagopro.pl](http://www.jagopro.pl)

**ДИСТРИБУТОР:**

Капеифарма ООД

4000, гр. Пловдив,







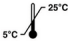

ул. Света Петка 16, ет.2


[www.capeypharma.bg](http://www.capeypharma.bg)

**ВАВУНЕБУСАР** е медицинско изделие



**9. ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ИЗПОЛЗВАНИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА**

	Маркировка за съответствие с изискванията за медицинско изделие
	Производител
	Срок на годност
	Партиден номер
	Дръж далеч от слънчева светлина
	Запознай се с инструкцията за употреба
	Температура за съхранение
	Не използвай, ако опаковката е повредена

	Алуминиев контейнер
	Картонена опаковка
	Обща вместимост на опаковката
	Съответствие с изискванията за аерозолните продукти
	Маркировка за съответствие с разпоредбите за контрола на пакетиранияте продукти

Дата на изготвяне на последната версия на инструкцията за употреба: 02.2025

Номер на версията: 1

425023/IU/02/2025\_v1